


## Alkoholische Flächendesinfektion

# Medizid® Rapid+

Hochwirksame, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen und Gegenstände

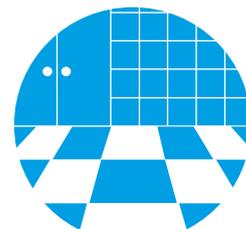

### Präparatetyp

Medizid® Rapid+ ist eine gebrauchsfertige, alkoholhaltige Sprühwischdesinfektionslösung mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen in medizinischen Einrichtungen. Ideal zur Schnelldesinfektion zwischen Behandlungen und Eingriffen, besonders wenn kurze, praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind.

### Anwendungsbereich

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.

### Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit Medizid® Rapid+ benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

### Haltbarkeit

Medizid® Rapid+ kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

### Zusammensetzung

Wirkstoffe in 100 g:

0,05 g Didecylmethylammoniumchlorid, 63,5 g Ethanol

### Einwirkzeit:

Wirksamkeiten	vollständig benetzt
<b>Gemäß den Richtlinien der VAH:</b>	
Bakterizid, levurozid inkl. 4-Feldertest:	<b>1 Min.</b> (geringe Belastung)
Bakterizid, levurozid ohne Mechanik:	<b>2 Min.</b> (hohe Belastung)
Mykobakterizid ohne Mechanik:	<b>5 Min.</b> (hohe Belastung)



### Präparateeigenschaften

- Aldehydfrei
- Wirksamkeit:
  - Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid wirksam
  - Fungizid wirksam
  - Mykobakterizid wirksam
  - **Viruzid wirksam**
- VAH gelistet

REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
01002+	250 ml	12 Flaschen	16015216
00975+	500 ml	18 Flaschen	16015222
00976+	1 L	12 Flaschen	16015239
00977+	5 L	2 Kanister	16015245

**Zubehör** (siehe Seite 155)

Kanisterhahn

Kanisterschlüssel

Sprühkopf für 1-l-Flasche